

BONNEHEURE®

GEL Z MEDICINSKIM REKOMBINANTNIM HUMANIZIRANIM KOLAGENOM

NAVODILA ZA UPORABO

[Ime izdelka]: Gel z medicinskim rekombinantnim humaniziranim kolagenom

[Model/Specifikacija]: 5 g / steklenička, 20 g / steklenička, 30 g / steklenička, 50 g / steklenička, 80 g / steklenička, 100 g / steklenička

[Glavne sestavine]: Izdelek je sestavljen iz rekombinantnega humaniziranega kolagena tipa III, ksantan-skega gumija, glicerina, metil parabena, fenoksietanola in vode za injekcije.

[Namen uporabe]: Primeren je za oskrbo nekroničnih ran, kot so poškodbe kožne pregrade zaradi razjed na obrazu in za nego okoliške kože. Uporablja se izključno kot mehanska zaščita.

[Lastnosti delovanja]: Izdelek mora biti brezbarven, homogen in viskozen gel, brez vidnih tujkov ali nečistoč. Steklena steklenička mora biti brez madežev, njen vrat ne sme kazati iztekanja vsebine, prav tako pa na embalaži ne sme biti ostrih robov ali drugih napak.

[Kontraindikacije]: Izdelka ne smejo uporabljati osebe, alergične na beljakovinske izdelke. Pri nosečnicah in doječih materah je potrebna previdnost.

[Navodila za uporabo]: Samo za lokalno zunanjo uporabo. Kožo očistite in nanosite gel tako, da prekrije celotno rano. Uporabljajte dvakrat na dan ali po navodilih zdravnika, dva tedna.

[Previdnostni ukrepi]: Izdelek ne uporabljajte, če: a) je potekel rok uporabe, b) je embalaža poškodovana. Izdelek je namenjen izključno za zunanjo uporabo na koži, ni za peroralno uporabo. Pred uporabo si temeljito umijte roke. Če se med uporabo pojavi pekoč občutek, rdečina ali oteklina, prenehajte z uporabo, kožo očistite in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Hranite izven doseg a otrok. Izdelek je priporočljivo uporabljati samostojno. Če je potrebna kombinirana uporaba, se predhodno posvetujte z zdravnikom. Izdelek je namenjen adjuvantnemu (podpornemu) zdravljenju kožnih ran, ki ne zahtevajo aseptičnega postopka. Po odprtju embalaže je priporočljivo, da izdelek porabite v enem mesecu. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.

[Opozorila za varno uporabo]:

Pred uporabo natančno preberite navodila ali izdelek uporabite po navodilih zdravstvenega strokovnjaka.

[Pakiranje]: Izdelek je pakiran v stekleničkah; 1 steklenička v skatli.

[Składiščenje in transport]: Izdelek shranjujte v hladnem in suhem prostoru, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. Transport pri sobni temperaturi. Zamrzovanje in ponovno odtajanje ne vplivata na uporabnost izdelka.

[Datum proizvodnje]: Naveden na embalaži.

[Rok uporabe]: Dve leti.

	CE oznaka		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Medicinski pripomoček		Glejte navodila za uporabo
	Kataloška številka		Pozor!
	Številka serije		Proizvajalec
	Uporabno do		Datum proizvodnje
	Ne-sterilno		Pooblašeni zastopnik v Evropski skupnosti
	Hraniti stran od sončne svetlobe		Enotna identifikacijska oznaka pripomočka (UDI)
	Hraniti na suhem		Za enkratno uporabo

[Proizvajalec]: Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd

[Naslov proizvodnje]: 218 metrov vzhodno od križišča ulic Qingnian Road in Dingdang Road, ulica Tianzhong, okrožje Dingtao, mesto Heze, provinca Shandong, Kitajska, 274100

[Tel.]: +86-530-6277775

[E-pošta]: dnutrimec@gmail.com

[Pooblašeni zastopnik v EU (EC REP)]:

Naziv: Humiss Beratung GmbH **Naslov:** Gneisenaustraße 8, 40477 Düsseldorf, Nemčija

[Uvoznik]: Wealth is Health d.o.o., Jezeri I dio, Jezero 36, 47304 Paški, Hrvaška

[SRN]: DE-AR-000023447

Izdelano na Kitajskem

[Datum priprave navodil]: 1. januar 2024 **Revizija:** A/1

[Distributer]: Grandevita d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana, Slovenija