


NAZWA PLIKU: ID8930 SANOPHARMA KTT 9ml IFU 210x297mm REV-8930-202603-1-0-0			
MATERIAŁ: Papier Kreda 90g MAT	KOLORYSTYKA:  CMYK  CUT  SIZE		
GRAFIK: MR	 C5 M100 Y75 K0  C100 M100 Y37 K32  black 10%		

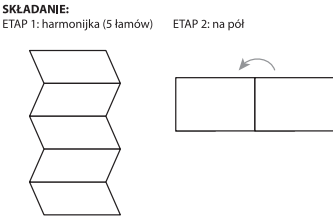

KICK THE TICK® expert NAVODILA ZA UPORABO



Pinceta za
odstranjanje
klopov

Raztopina za
zamrzovanje klopov

1. OPIS IZDELKA

KICK THE TICK® expert je varen komplet za odstranjanje klopov. Vključuje posebno pršilo, ki klopa zamrzne in prepreči sproščanje kužne sline, ki je lahko škodljiva za ljudi in živali, ter pripomoček – pinceto, za odstranjanje klopov.

VSEBINA

1. OPIS IZDELKA
2. NAMEN UPORABE
3. SESTAVA
4. NAVODILA ZA UPORABO
5. UČINKOVITOST
6. KONTRAINDIKACIJE IN PREVIDNOSTNI UKREPI
7. SHRANJEVANJE
8. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
9. OPOZORILO
10. RAZLAGA SIMBOLOV
11. DODATNE INFORMACIJE
12. DEJSTVA IN MITI

2. NAMEN UPORABE

KICK THE TICK® expert je varen medicinski pripomoček, namenjen odstranjevanju klopov s kože ljudi.

Priporočamo ga za zmanjšanje tveganja za bolezni, ki jih prenašajo klopi, kot so klopni meningoencefalitis, lymška borelijoza, babezioza, anaplazmoza in druge.

KAKO DELUJE

Izdelek klopa pred odstranitvijo zamrzne in zavira prenos njegove kužne sline.

Tehnologija APRFTM (Anti-Parasite Removal Film) ustvari dolgotrajen zaščitni film, ki preprečuje poškodbo klopa med odstranjevanjem ter zmanjšuje tveganje za stik s povzročitelji okužb.

Pripomoček **KICK THE TICK®** je posebej zasnovan za hitro in varno odstranjevanje klopov vseh velikosti.

3. SESTAVA

Sestava pršila KICK THE TICK® spray:


izoheksadekan, izopropil miristat, 1,3,3,3-tetrafluoropropen, 1,1,1,2-tetrafluoroetan.

4. NAVODILA ZA UPORABO

Korak 1: Zamrzovanje prisesanega klopa

1

Odpnite pinceto za odstranjevanje klopov s pršilnika.

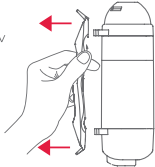

2

Odklenite pršilnik tako, da obroč obrnete iz zaprtega v odprti položaj.




2X

Pred prvo uporabo aktivirajte pršilnik z dvema pritiskoma.




3

Previdno namestite šobo nad klopa.

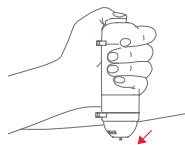

4

Gumb pršilnika pritisnite do konca. Število odmerkov je odvisno od velikosti klopa (glejte spodnjo tabelo).

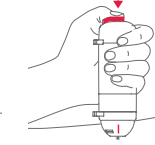

Čas med posameznimi nanosi ne sme presegati 3 sekund.

5

Po uporabi pršilnik zavarujte tako, da ga obrnete iz odprtega v zaprti položaj.



! POMEMBNO!

Nepravilna uporaba lahko povzroči razpad klopa, kar poveča tveganje za izpostavljenost povzročiteljem okužb. Za preprečitev neposrednega stika s klopom je med odstranjevanjem priporočljivo nositi zaščitne rokavice.

Klopa, ki je prisenan dalj časa, se lahko trajno pritrdi, zato je odstranjevanje težje. Morebitne ostanke klopa v koži naj odstrani zdravnik.

Korak 2: Odstranjevanje zamrznjenega klopa

Prisesanega klopa previdno odstranite z ustreznim nastavkom (A ali B) pripomočka – pincete KICK THE TICK®, glede na velikost klopa (ličinka/nimfa ali odrasel klop).

1 ODMEREK ličinke in nimfe

0,8 mm
(Ixodes ricinus)

1,5 mm

A

NASTAVEK A

2 ODMERKA srednje veliki in veliki klopi

ok. 3,5 mm
(Ixodes ricinus)

ok. 5 mm
(Dermacentor reticulatus)

B

NASTAVEK B



210mm

Korak 2: Odstranjanje zamrznjenega klopa

1

Z ustrezno izbranim nastavkom trdno primate klopa čim bližje površini kože.

2

Med rahlim vrtenjem klopa enakomerno potegnite navzgor.

3

Preverite, ali so v koži ostali deli klopa. Obdelano mesto razkužite. Odstranjenega parazita ustrezno zavržite.

4

Razkužite uporabljene pripomočke. Roke temeljito umijte z milom in vodo ali uporabite razkužilo.

5. UČINKOVITOST

Pršilo Kick the Tick® vsebuje **60 odmerkov**, kar zadostuje za odstranitev do **40 kloпов**.

7. SHRANJEVANJE

Hranite v originalni embalaži, izven dosega otrok, pri temperaturi pod 40°C.

8. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

9. POMEMBNE INFORMACIJE

- ➕ Pred uporabo natančno preberite Navodila za uporabo.
- ➕ Izdelek uporabljajte samo, kot je priporočeno v teh navodilih.
- ➕ V primeru dvomov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- ➕ Navodila shranite za nadaljnjo uporabo.
- ➕ V primeru zdravstvenega zapleta, povezanega z izdelkom, obvestite proizvajalca in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče.

11. DODATNE INFORMACIJE

Če je klop prisesan na težko dostopnem mestu (dimlje, pazduha, za ušesi ali za kolenom), priporočamo, da pri odstranjevanju zaprosite za pomoč.

Po odstranitvi klopa več tednov spremljajte mesto ugriza. Pojav lokalnega ali splošnega vnetja lahko kaže na prenos povzročiteljev okužbe.

Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo: slabo počutje ali vročina, razširjajoč se rdeč izpuščaj (erythema migrans), ki je značilen znak lymške borelioze.

12. DEJSTVA IN MITI

Klopi se nahajajo samo v gozdovih in travnatih območjih – to je mit!

Pogosto jih najdemo tudi v urbanih območjih, kot so domači vrtovi in parki. Večina ugrizov kloпов je nebolečih in ne povzroča srbenja ali draženja, zato je pomemben reden pregled celega telesa.

Klopi se lahko prisesajo na katerikoli del telesa, najpogosteje pa izberejo mesta, kjer je koža tanjša, kot so ušesa, dimlje, za kolena, pazduhe, lasišče in vrat.

6. KONTRAINDIKACIJE IN PREVIDNOSTNI UKREPI

- ✦ Uporabljajte samo v skladu z navodili za uporabo.
- ✦ Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 3 let.
- ✦ Pri otrocih uporabljajte samo pod nadzorom odraslih.
- ✦ Ne nanašajte na poškodovano ali obolelo kožo.
- ✦ Ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti (alergije) na katerokoli sestavino.
- ✦ Izogibajte se stiku z očmi, usti, nosom in intimnimi predeli.
- ✦ Ne vdihavajte.
- ✦ Prekomerna uporaba lahko povzroči pordelost kože. Če se pojavi draženje, prenehajte z uporabo, sperite s toplo (ne vročo) vodo in kožo osušite.
- ✦ Če simptomi vztrajajo (beljenje kože, rdečina, oteklina, bolečina), se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- ✦ Samo za zunanjo uporabo

10. RAZLAGA SIMBOLOV

Proizvajalec	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
Distributer	Glejte navodila za uporabo
Medicinski pripomoček	Ravnajte previdno
CE oznaka (skladnost z zahtevami EU)	Enolični identifikator pripomočka
Serijska številka	Hranite zaščiteno pred svetlobo
Rok uporabe	Referenčna številka
Temperaturna omejitev	

Distributer za Slovenijo:
Top Pharma d.o.o.
Potok pri Komendi 15
SI-1218 Komenda
www.toppharma.si
info@toppharma.si

Proizvajalec
ICB Pharma sp. z o.o.
ul. S. Lema 10
43-603 Jaworzno, Poljska
www.icbpharma.com
office@icbpharma.com

