

BONNEHEURE®
KREMA Z MEDICINSKIM REKOMBINANTNIM HUMANIZIRANIM KOLAGENOM
NAVODILA ZA UPORABO

[Ime izdelka]: Krema z medicinskim rekombinantnim humaniziranim kolagenom
[Model/Specifikacija]: 5 g / tuba, 20 g / tuba, 50 g / tuba, 95 g / tuba
[Glavne sestavine]: Izdelek je sestavljen iz rekombinantnega humaniziranega kolagena tipa III, vlažilca, emulgatorja, hidroksifenilata, fenoksietanola in vode za injekcije.
[Namen uporabe]: Primeren je za oskrbo nekroničnih ran (na primer poškodb kožne pregrade zaradi razjed na obrazu) ter nege okoliške kože. Izdelek se uporablja izključno kot mehanska zaščita.
[Lastnosti delovanja]: Izdelek mora biti mlečno bele ali rahlo rumenkaste barve, v obliki paste, brez vidnih tujkov ali nečistoč. Površina tube mora biti čista, vsebina ne sme iztekati iz odprtine, tuba pa ne sme imeti napak, kot so ostri robovi ali zareze.
[Kontraindikacije]: Izdelka ne smejo uporabljati osebe, alergične na beljakovinske izdelke.
Pri nosenicah in doječih materah je potrebna previdnost.
[Navodila za uporabo]: Samo za lokalno zunanjo uporabo. Po čiščenju kože nanesite kremo na prizadeto mesto. Uporabljajte dvakrat na dan ali po navodilih zdravnika, dva tedna zapored.
[Previdnostni ukrepi]: Izdelka ne uporabljajte, če: a) je potekel rok uporabe, b) je embalaža poškodovana. Izdelek je namenjen izključno za zunanjo uporabo na koži, ni za peroralno uporabo.
Če se med uporabo pojavi pekoč občutek, rdečina ali oteklina, prenehajte z uporabo, kožo očistite in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Hranite izven doseg a otrok. Izdelek je priporočljivo uporabljati samostojno. Če je potrebna kombinirana uporaba, se predhodno posvetujte z zdravnikom. Bele, mlečno bele in rahlo rumenkaste barvne nianse izdelka so normalen pojav in ne vplivajo na učinkovitost. Izdelek je namenjen adjuvantni (podporni) oskrbi kožnih ran, ki ne zahtevajo aseptičnega postopka.
[Opozorila za varno uporabo]: Pred uporabo natančno preberite navodila ali izdelek uporabite po navodilih zdravstvenega delavca.
[Pakiranje]: Izdelek je pakiran v steklenih tubah; 1 kos v škafli.
[Skladiščenje in transport]: Izdelek shranjujte v notranjih prostorih pri sobni temperaturi. Zamrzovanje in ponovno odtajanje ne vplivata na uporabnost izdelka.
[Datum proizvodnje]: Oglejte si oznako na embalaži.
[Rok uporabe]: Dve leti.

	CE oznaka		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Medicinski pripomoček		Glejte navodila za uporabo
	Kataloška številka		Pozor!
	Številka serije		Proizvajalec
	Uporabno do		Datum proizvodnje
	Ne-sterilno		Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti
	Hraniti stran od sončne svetlobe		Enotna identifikacijska oznaka pripomočka (UDI)
	Hraniti na suhem		Za enkratno uporabo

[Proizvajalec]: Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd
[Naslov proizvodnje]: 218 metrov vzhodno od križišča ulic Qingnian Road in Dingdang Road, ulica Tianzhong, okrožje Dingtao, mesto Heze, provinca Shandong, Kitajska, 274100
[Tel.]: +86-530-6277775 **[E-pošta]:** dnutrimec@gmail.com
[Pooblaščen zastopnik v EU (EC REP)]:
Naziv: Humiss Beratung GmbH **Naslov:** Gneisenaustraße 8, 40477 Düsseldorf, Nemčija
[Uvoznik]: Wealth is Health d.o.o., Jezeri I dio, Jezero 36, 47304 Paški, Hrvaška
[SRN]: DE-AR-000023447
Izdelano na Kitajskem
[Datum priprave navodil]: 1. januar 2024 **Revizija:** A/1
[Distributer]: Grandevita d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana, Slovenija