

BONNEHEURE®

MEDICINSKO PRŠILO ZA OBNOVO KOŽE Z REKOMBINANTNIM HUMANIZIRANIM KOLAGENOM, 30 ml

NAVODILA ZA UPORABO

[Ime izdelka]: MEDICINSKO PRŠILO ZA OBNOVO KOŽE Z REKOMBINANTNIM HUMANIZIRANIM KOLAGENOM

[Model/Specifikacija]: 30 ml / steklenička

[Glavne sestavine]: Izdelek je sestavljen iz rekombinantnega humaniziranega kolagena tipa III, vode za injekcije, glicerina, dinatrijevega fosfata, fenoksietanola, natrijevega fosfata, natrijevega klorida in majhne količine konzervansov.

[Namen uporabe]: Vlaženje in obnavljanje kože. Primeren je za vsakodnevno regeneracijo kože.

[Lastnosti delovanja]: Izdelek mora biti brezbarvna, homogena tekočina v obliki pršila, brez vidnih tujkov in nečistoč. Videz stekleničke mora biti brez madežev, vrat stekleničke ne sme kazati znakov iztekanja tekočine, brez ostrih robov, zarez ali drugih napak.

[Kontraindikacije]: Izdelka ne smejo uporabljati osebe, alergične na beljakovinske izdelke. Pri nosečnicah in doječih materah je potrebna previdnost.

[Navodila za uporabo]: Za zunanjo uporabo, trikrat na dan; za najboljši učinek priporočena neprekinjena uporaba 15 dni.

[Previdnostni ukrepi]: Izdelka ne uporabljajte, če: a) je potekel rok uporabe, b) je embalaža poškodovana. Izdelek je namenjen izključno za zunanjo uporabo na koži, ni za peroralno uporabo. Pred uporabo si temeljito umijte roke. Če se med uporabo pojavi pekoč občutek, rdečina ali oteklina, prenehajte z uporabo, kožo očistite in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Hranite izven dosega otrok. Izdelek je namenjen adjuvantnemu (podpornemu) zdravljenju kožnih ran, ki ne zahtevajo aseptičnega postopka. Izdelek je potrebno porabiti v roku enega meseca po odprtju. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.

[Opozorila za varno uporabo]: Pred uporabo natančno preberite navodila ali izdelek uporabite po navodilih zdravstvenega strokovnjaka.

[Pakiranje]: Izdelek je pakiran v steklenem vsebniku; 1 vsebnik v škatli.

[Skladiščenje in transport]: Izdelek shranjujte v hladnem in suhem prostoru, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. Transport pri sobni temperaturi.

[Datum proizvodnje]: Naveden na embalaži.

[Rok uporabe]: Dve leti.

	CE oznaka		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Medicinski pripomoček		Glejte navodila za uporabo
	Kataloška številka		Pozor!
	Številka serije		Proizvajalec
	Uporabno do		Datum proizvodnje
	Ne-sterilno		Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti
	Hraniti stran od sončne svetlobe		Enotna identifikacijska oznaka pripomočka (UDI)
	Hraniti na suhem		

[Proizvajalec]: Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd

[Naslov proizvodnje]: 218 metrov vzhodno od križišča ulic Qingnian Road in Dingdang Road, ulica Tianzhong, okrožje Dingtao, mesto Heze, provinca Shandong, Kitajska, 274100

[Tel.]: 0086-530-6277775

[E-pošta]: edward@dnutrimec.com



Naziv: Humiss Beratung GmbH **Naslov:** Gneisenaustraße 8, 40477 Düsseldorf, Nemčija

[Uvoznik]: Wealth is Health d.o.o., Jezeri I dio, Jezero 36, 47304 Paški, Hrvaška

[SRN]: DE-AR-000023447

Izdelano na Kitajskem

[Datum priprave navodil]: 1. januar 2024

Revizija: A/1

[Distributer]: Grandevita d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana, Slovenija