

BONNEHEURE®

OBLIŽ Z MEDICINSKIM REKOMBINANTNIM HUMANIZIRANIM KOLAGENOM NAVODILA ZA UPORABO

[Ime izdelka]: Obliž z medicinskim rekombinantnim humaniziranim kolagenom

[Model]: Okrogel

[Specifikacija]: 25 g/kos, 5 obližev v škatli

[Glavne sestavine]: Izdelek je sestavljen iz rekombinantnega humaniziranega kolagena tipa III, karbomerja, hidroksietil celuloze, glicerina, natrijevega metilparabena, natrijevega propilparabena, fenoksietanola, vode za injekcije in netkanega tekstila. Izdelek je namenjen za enkratno uporabo in je nesterilen.

[Namen uporabe]: Primeren je za oskrbo nekroničnih ran in neokoliške kože.

[Lastnosti delovanja]: Izdelek mora biti bel ali rahlo rumenkast vlažen film, brez neprijetnega vonja, brez vidnih madežev ali nečistoč. Mora prenesti obtežitev 500 g za 3 minute, ne da bi se pretrgal.

[Kontraindikacije]: Izdelka ne smejo uporabljati osebe, alergične na beljakovinske izdelke.

Pri nosečnicah in doječih materah je potrebna previdnost.

[Navodila za uporabo]: Samo za zunanjo uporabo. Po čiščenju kože odprite zunanjo embalažo, vzemite obliž, ga razgrnite in namestite na kožo. Nežno pritisnite robove, da se netkani tekstil dobro prileže na obraz. Uporabite na vsakih 15–30 minut, brez potrebe po izpiranju. Enkrat dnevno, dva tedna.

[Previdnosti ukrepi]: Izdelka ne uporabljajte, če: a) je potekel rok uporabe, b) je embalaža poškodovana. Izdelek je namenjen izključno zunanji uporabi na koži, ni za peroralno uporabo. Če se med uporabo pojavi pekoč občutek, rdečina ali oteklina, prenehajte z uporabo, kožo temeljito očistite in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Hranite izven dosega otrok. Izdelek je priporočljivo uporabljati samostojno. Če je potrebna kombinirana uporaba, se predhodno posvetujte z zdravnikom. Izdelek je namenjen adjuvantni (podporni) oskrbi ran na koži, kjer ni potreben aseptičen postopek.

[Opozorila]: Pred uporabo natančno preberite navodila ali izdelek uporabite po navodilih zdravnika.

[Pakiranje]: Izdelek je pakiran v alu folijo, 5 kosov v škatli.

[Skladščjenje in transport]: Shranjujte v notranjih prostorih pri sobni temperaturi. Zamrzovanje in ponovno odtajanje ne vplivata na uporabnost izdelka.

[Datum proizvodnje]: Označeno na embalaži.

[Rok uporabe]: Dve leti.

	CE oznaka		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Medicinski pripomoček		Glejte navodila za uporabo
	Kataloška številka		Pozor!
	Številka serije		Proizvajalec
	Uporabno do		Datum proizvodnje
	Ne-sterilno		Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti
	Hraniti stran od sončne svetlobe		Enotna identifikacijska oznaka pripomočka (UDI)
	Hraniti na suhem		Za enkratno uporabo

[Proizvajalec]: Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd

[Naslov proizvodnje]: 218 metrov vzhodno od križišča ulic Qingnian Road in Dingdang Road, ulica Tianzhong, okrožje Dingtao, mesto Heze, provinca Shandong, Kitajska, 274100

[Tel.]: +86-530-6277775 **[E-pošta]:** dnutrimec@gmail.com

[Pooblaščen zastopnik v EU (EC REP)]:

Naziv: Humiss Beratung GmbH **Naslov:** Gneisenaustraße 8, 40477 Düsseldorf, Nemčija

[Uvoznik]: Wealth is Health d.o.o., Jezeri I dio, Jezero 36, 47304 Paški, Hrvaška

[SRN]: DE-AR-000023447

Izdelano na Kitajskem

[Datum priprave navodil]: 1. januar 2024 **Revizija:** A/1

[Distributer]: Grandevita d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana, Slovenija