

Tears Again Sensitive®

Liposomsko pršilo za oči z liposomi + dekspantenol,
brez konzervansov

Navodilo za uporabo:

Prosimo, preberite to navodilo takoj, da boste lahko izdelek pravilno uporabljali.

Sestavine:

lecitin 10mg/ml, dekspantenol, natrijev klorid, etanol, vitamina A - palmitat, prečiščena voda.

Indikacije in klinična uporaba:

Liposomsko pršilo **Tears Again Sensitive** stabilizira in varuje zaščitni lipidni sloj solzne tekočine. Izboljša vlažnost površine očesa in očesne veke. Za zdravljenje in lajšanje draženja očesa zaradi zunanjih vplivov in obnovo porušenega solznega filma. Uporablja se za suhe, pekoče, srbeče, utrujene, razdražene, solzne oči ali občutek tujka. Nošenje kontaktnih leč postane z uporabo bolj udobno.

Lastnosti:

Liposomi (lecitin) dopolnjujejo zaščitno lipidno plast solznega filma. Liposomi in dekspantenol vlažijo predel oči ter negujejo in ščitijo kožo okoli oči.

Navodilo za uporabo: Tears Again Sensitive popršite 1-2 krat na zaprto veko z oddaljenosti 10 cm. Kadar uporabljate kozmetiko za oči, popršite z nekoliko večje razdalje, da ne pokvarite make-upa. Splošno priporočilo: pršilo Tears Again Sensitive uporabite 3-4 krat dnevno. V težjih primerih lahko pršilo Tears Again Sensitive uporabite brez zadržkov tudi večkrat dnevno.

Tears Again Sensitive lahko uporabljate med nošenjem kontaktnih leč.

Kontraindikacije in previdnostni ukrepi:

Ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katero koli sestavino.

Če uporabljate tudi kapljice za oko/mazilo za oko, je treba upoštevati 10-minutni interval.

Ne pršite v odprto oko.

Hranite izven dosega otrok.

Če simptomi vztrajajo ali se poslabšajo, poiščite zdravniško pomoč.



Stranski učinki:

V zelo redkih primerih se lahko pojavi začasno rahlo draženje (npr. pordelost, otekanje vek), ki je omejeno na področje uporabe. Pojavijo se akutno in po koncu aplikacije hitro in brez posledic izzvenijo.

Če se v zvezi s tem medicinskim pripomočkom pojavi resen neželeni učinek, o tem obvestite proizvajalca ali pristojni organ.

Rok uporabnosti, skladiščenje in odstranjevanje:

Shranjujte pri temperaturi med 2° in 25°C.

Po odprtju se lahko uporablja 6 mesecev.

Ne uporabljajte po poteku roka uporabnosti.

Prosimo, da ta medicinski pripomoček odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

Stanje informacij: 2021-05

Proizvajalec:

 Optima Medical Swiss AG,
Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug

Distribucija:

Optima Pharmazeutische GmbH
Ludwigstr. 49, 85399 Hallbergmoos, Nemčija
www.optimapharma.de



Optima Sanita S.r.l.
Viale della Stazione 5, 39100 Bolzano (BZ), Italija

Zastopnik in distributer za Slovenijo:

Top Pharma d.o.o., Potok pri Komendi 15, SI-1218 Komenda
www.toppharma.si, info@toppharma.si



Proizvajalec



Rok uporabe
(LLLL-MM:
leto-mesec)



Serijska številka



Temperatura
shranjevanja



Sledite
navodilom



Ne uporabljajte,
kadar je
steklenička
poškodovana.



Po odprtju
uporabno
6 mesecev.



Medicinski
pripomoček



Zastopnik
v Evropski
skupnosti

